

Rutin, *Installation akutlarm*


Ibland kan det inträffa att en brukare behöver ett trygghetslarm akut. Orsaker till detta kan vara försämrat hälsotillstånd, att ordinarie trygghetslarm gått sönder eller en oplanerad utskrivning från sjukhuset. I varje verksamhet finns 1-3 st så kallade *akutlarm* som med kort varsel kan placeras ut hemma hos den enskilde. Dessa akutlarm är förprogrammerade till respektive verksamhet, men inte kopplade till en specifik brukare.

Då ett akutlarm ska installeras hemma hos en brukare i väntan på att larminstallatör kan installera ett personligt trygghetslarm, eller byta ut ett trasigt, ska följande moment utföras;

- Provlarm ska utföras från larmklockan.
- Vid provlarm, säkerställ att larmcentralen vet att det är Akutlarm 1, 2 eller 3 som larmar, och att larmen rings ut till er enhet, rätt sökväg.
- Information om trygghetslarmet och dess funktion ska ges till brukaren, *Information, digitalt trygghetslarm*. Informationsmaterialet återfinns på www.linkoping.se/ehalsa under “puff” *Välståndstjänster, Ledningssystem och rutiner*
- Nyckel måste kvitteras ut till verksamheten. Kvitteras ingen nyckel ut, får inget larm installeras. Nyckelkvittens ska skrivas och undertecknas, se; *Kvittens Nyckel* Återfinns på www.linkoping.se/ehalsa under “puff” *Välståndstjänster, Ledningssystem och rutiner*.
- Personal som kvitterar ut nyckel måste säkerställa att det är rätt nycklar/taggar och att de fungerar, i ytterdörr och ev. entréport.
- Sätt en lapp på ert nyckelskåpet eller liknande där det står vilken brukare som har akutlarm 1, 2 eller 3. Namn, personnummer, adress och telefonnummer. Hanteras enligt lokala rutiner.
- Dokumentera i Treserva
- Beställning av personligt trygghetslarm ska skickas snarast möjligt, se *Rutin, Beställa nytt trygghetslarm och digital låsenhet*. Återfinns på www.linkoping.se/ehalsa under “puff” *Välståndstjänster, Ledningssystem och rutiner*

För att installera ett akutlarm i brukarens bostad, följ dessa punkter:

- I larmkartongen, benämnd Akutlarm 1, 2 eller 3, skall det finnas en larmenhet, en strömkabel och en larmklocka. Larmklockan har antingen armband eller halsband.
- Strömkabeln ska vara ansluten på undersidan av larmenheten. Slå på strömknappen.

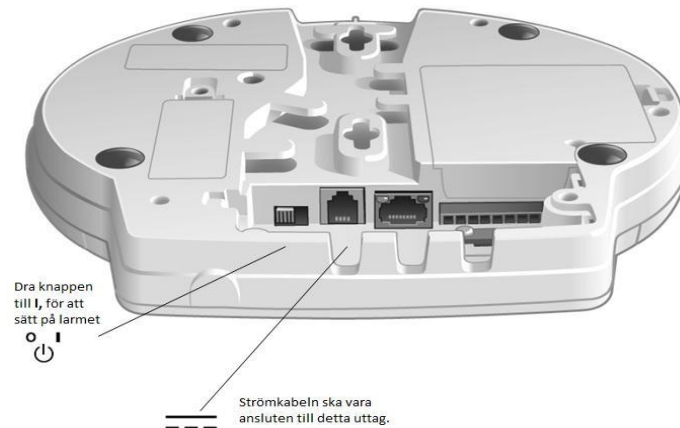

- När larmet är påslaget och strömkabeln är ansluten, sätt i strömkontakten i väggen. En grön (⏻) och en röd lampa (+) kommer att tändas på framsidan av larmet. Gröna lampan indikerar att larmet är påslaget.
- Den röda lampan (+) indikerar att larmets simkort söker efter mobiltäckning. Röda lampan slocknar när mobiltäckning uppnåtts. Slocknar inte lampan inom 2-3 minuter, prova att flytta larmet till ett annat rum, sätt i strömkontakten och försök igen.
- Röda lampan (+) måste slockna innan provlarm kan utföras.
- Provlarma på larmklockan så långt ifrån larmenheten som möjligt (inne i bostaden), ex andra sidan lägenheten. En röst säger då *Trygghetslarm radio*.
- Gå tillbaka till larmenheten och invänta svar från larmcentralen. Säkerställ att larmcentralen vet att det är Akutlarm 1, 2 eller 3 som larmar. Fråga även efter vilka sökvägar larmcentralen har till detta larm.
- I vissa fall skickas inget larm vid tryck på larmklockan. Larmklockan är då inte registrerad i larmet.

Registrera in larmklockan i larmenheten

- 1 Håll in den gröna knappen i ca 4 sekunder.
- 2 Den översta lampan börjar nu att blinka.
- 3 Larma med hjälp av tillbehöret som ska läsas in, t.e.x. en extra larmknapp.
- 4 Apparaten spelar upp en melodi när radiosignalen tas emot.
- 5 Kvittera inläsningen med den röda knappen.

