



## **Information: *Personliga inställningar för mobilt trygghetslarm, GPS***

Vilka inställningar/ funktioner som GPS-larmet skall ha beslutas vid utprovningen, som utförs av arbetsterapeut i samråd med brukare/ närstående/ hemtjänst.

Arbetsterapeut skickar färdig utprovning till välfärdsteamet som ansvarar för att registrera överenskomna inställningar/ funktioner samt installationen av GPS-larmet. I samband med installationen lämnas erforderlig information till berörda.

Funktioner som kan aktiveras:

### **Aktiv larmknapp:**

När brukaren trycker på larmknappen på klockan skickas ett larm till Careium larmcentral. Brukaren kan då kommunicera med larmcentralen via GPS-klockan.

Aktiv larmknapp går ej att ha aktiverad tillsammans med inställningen trygg zon.

### **Ringa till GPS-klocka:**

Innebär att det går att ringa till GPS-klockan och samtala med brukaren. Brukaren behöver ej göra något aktivt på klockan för att svara. Endast förprogrammerade telefonnummer är behöriga att kunna ringa till GPS-klockan. Överenskommelse sker vid utprovningen.

GPS-klockans telefonnummer lämnas ut av välfärdsteamet vid installationen. Telefonnummer ska förvaras så att obehöriga ej kommer åt det.

### **Hemmazon:**

Innebär att GPS-larmet är uppkopplat via bluetooth till laddstationen. Förflyttar sig brukaren för långt ifrån laddstationen, tappar GPS-larmet kopplingen till bluetooth, då går ett larm till omsorgspersonal via Careium larmcentral.



### **Trygg zon:**

Brukaren har en uppritad karta/zon, ett "virtuellt staket". När brukaren rör sig utanför denna karta/zon går ett larm till omsorgspersonal via Careium larmcentral. Personalen får senaste angivna position från Careium larmcentral. Se brukarens genomförandeplan för hur inkommande larm ska hanteras.

Omsorgspersonalen ansvarar för att möta upp brukaren där den befinner sig, för att kunna ge brukaren ett personligt bemötande och underlätta att hjälpa brukaren hem.

Kom ihåg att det går att ringa tillbaka till larmcentralen och begära ut ny position om personen inte kan lokaliseras efter första position. Ange brukarens namn, personnummer samt behörighetskod för att kunna få senaste position. Telefonnummer till Careium larmcentral: 0706-00 61 46

Behörighetskod för GPS-klockan lämnas ut av välfärdsteamet vid installationen.

Behörighetskoden ska förvaras så att obehöriga ej kommer åt den.

Om omvårdnadspersonal bedömer att de inte har möjlighet att möta upp brukaren, ex

- Brukaren befinner sig långt iväg, sitter på ett tåg, långt ut i skogen, är på annan ort, då kontaktas polis

Aktiv larmknapp går ej att ha aktiverad tillsammans med inställningen trygg zon

### **Söka/ spåra:**

Om brukaren saknas och position ska begäras ut, ring upp Careium larmcentral, ange brukarens namn, personnummer samt behörighetskod för att kunna få senaste position.

Telefonnummer till Careium larmcentral: 0706-00 61 46

Behörighetskod för GPS-klockan lämnas ut av välfärdsteamet vid installationen.

Behörighetskoden ska förvaras så att obehöriga ej kommer åt den.