



Omsorg- och Äldreförvaltningen

**Dokumentansvarig**

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

**Dokumentnamn**

Bladder Scan BVI 9400, medicinteknisk produkt

**Utfärdad:** 2016-02-02

**Reviderad:** 2016-02-24

**Dnr On:** 2016-75 **Än:** 2016-86

## Bladder Scan BVI 9400

Bladder Scan BVI 9400 är ett portabelt ultraljudsinstrument för icke invasiv mätning av urinblåsans volym. I kommunen finns sex Bladderscans. De är placerade på Ålerydsvägen 5, Aspens servicehus och Ryds servicehus dvs. i Leanlink hemsjukvård. Dessutom finns Bladderscan på korttidsboenden på Duvan, Kärna Vårdby och Ekhult. På varje enhet finns en ansvarig namngiven person (verksamhetschef eller sjuksköterska) som svarar för att rutin för självtest och kalibrering finns och utförs, att ultraljudsgel finns och att en rutin upprättas hur lån och återlämnande sker.

Samtliga vårdgivare oavsett organisation kan använda kommunens Bladderscans. Det är varje användares ansvar att vara aktsam om Bladder Scan och att meddela ansvarig person om något händer med utrustningen. Skador som uppstår vid handhavandet bekostas av den utförare som åsamkat skadan. Att använda Bladder Scan är en sjuksköterskeuppgift.

Mer information på [www.bladderscan.se](http://www.bladderscan.se)

### Använd inte Bladder Scan på

- Patient med skadad hud eller sår i suprapubisområdet
- Patient med ascites
- Gravid patient

Proben är MYCKET känslig för stötar.  
Vid transport ska Bladder Scan alltid förvaras i väskan.

### Till varje Bladder Scan medföljer

- Snabbmanual
- Drift- och underhållshandbok
- Två laddningsbara batterier

### Rengöring

Rengör proben efter användning med ytdesinfektion för hälso- och sjukvård.

### Underhåll

Självttest ska utföras var 3:e månad

Kalibrering utförs en gång per år.

### Leverantör

Allytec AB, Stockholm

[kontakt@allytec.se](mailto:kontakt@allytec.se) Tel: 08-31 01 46

