



*2018-10-15 Dnr Än 2017-290, Dnr On 2017-201, MAR, Rehab och
hjälpmedelsrådet
(utfärdad 2009-09-08)*

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr3)

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

AD-dyna med gel eller skummaterial

Säkerhet vid användning

- För att få bästa effekt av dynan ska så lite material som möjligt vara placerad mellan brukaren och dynan.
- Undersök brukarens hud dagligen. Om rodnad uppstår eller om huden blir skadad, kontakta arbetsterapeut.

Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera att överdraget är rätt placerat på dynan. Kontrollera också att dynan ligger rätt placerad i rullstolen. Se anvisning på dynan.
- Dynan och överdraget rengörs vid behov enligt märkning eller anvisning i bruksanvisningen.

Se bruksanvisning för hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrad personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.