



*2018-10-15 Dnr Än 2017-295, Dnr On 2017-201, MAR, Rehab och  
hjälpmedelsrådet  
(utfärdad 2010-10-27)*

## **Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)**

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

### **AD-dynor luftfyllda**

#### **Säkerhet vid användning**

Kontrollera dagligen att dynan är luftfylld och att den är rätt placerad i rullstolen.

- Undersök brukarens hud dagligen. Om rodnad uppstår eller om huden blir skadad, kontakta ansvarig arbetsterapeut.
- För att få bästa effekt av den luftfyllda dynan ska så lite material som möjligt vara placerat mellan brukaren och dynan.

#### **Underhåll av hjälpmedel**

- Luftmängden ska kontrolleras så att brukaren inte sitter igenom underlaget. För korrekt luftmängd se bruksanvisning och/eller kontakta arbetsterapeut.
- Kontrollera att överdraget är rätt placerat på dynan. Kontrollera också att dynan ligger rätt placerad i rullstolen. Se anvisning på dynan.
- Dynan och överdraget rengörs vid behov enligt märkning eller anvisning i bruksanvisningen.

Se bruksanvisning angående hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrad personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.