



*2018-10-15 Dnr Än 2017-189, Dnr On 2017-201, MAR, Rehab och
hjälpmedelsrådet
(utfärdad 2009-09-08)*

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

AD-madrasser, skummaterial

Säkerhet vid användning

- Undersök brukarens hud dagligen. Om rodnad uppstår eller om huden blir skadad, kontakta ansvarig arbetsterapeut.
- För att få bästa effekt ska så lite bäddutrustning som möjligt vara placerad mellan brukaren och madrassen.
- Undvik att madrassen kommer i kontakt med vassa föremål.
- AD-madrass utesluter inte regelbunden lägesändring.
- Säkerhetsavstånd till sänggrind bör beaktas.

Underhåll av hjälpmedel

- Madrass och/eller överdrag rengörs vid behov enligt märkning eller anvisning i bruksanvisningen.

Se bruksanvisning för hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrad personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.