



*2018-10-15 Dnr Än 2017-267, Dnr On 2017-201, MAR, Rehab och
hjälpmedelsrådet
(utfärdad 2009-09-08)*

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

Arbetsstol hydralisk eller elektrisk höjdställbar

Säkerhet vid användning

- Arbetsstolen ska alltid vara bromsad när man sätter sig och reser sig.
- Bromsfunktionen kan vara nedsatt vid ojämnt underlag.

Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera att arbetsstolens hjul är lätta att rulla och svänga samt att inget missljud hörs.
- Kontrollera att arbetsstolen höj- och sänkfunktion fungerar.
- Kontrollera att arbetsstolens bromsar fungerar.
- Laddning av batteri på en elektriskt reglerbar arbetsstol ska ske regelbundet, se bruksanvisning samt kontrollera att elkontakter, kablar och sladdar är hela.
- Chassiet rengörs enligt bruksanvisning.

Se bruksanvisning angående hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrad personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.