



*2018-10-15 Dnr Än 2017-264, Dnr On 2017-201, MAR, Rehab och
hjälpmedelsrådet
(utfärdad 2009-09-08)*

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

Duschstol med hjul, med eller utan tiltfunktion

Säkerhet vid användning

- Barriär/tvärslå, som är ett tillbehör, är inte avsedd att fungera som säkerhetsbälte. Vid användning av denna bör ej brukaren lämnas ensam, det finns risk för personskada. Får endast användas om brukaren samtycker till åtgärden.
- Det finns risk för urglidning om fotstöden inte sitter på plats.
- Kör baklänges över trösklar, annars finns risk för urglidning,
- Brukaren kan klämma sig när duschstolen placeras över toalettstolen samt när bäckenet sätts dit eller tas bort.
- Vid överförflyttning i/ur duschstol ska den alltid vara bromsad.

Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera att fotstöd/benstöd finns monterade på duschstolen.
- Kontrollera att armstöd, sits, ryggstöd och tillbehör är hela och sitter fast.
- Kontrollera på de duschstolar som är höj- och sänkbara att ”clips/sprintar” finns och sitter fast.
- Kontrollera att bromsarna går att låsa samt att duschstolen är lätt att manövrera och att inget missljud kan höras.
- Vid rengöring används fuktig trasa och mildt rengöringsmedel, se även bruksanvisning.

Se bruksanvisning angående hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrad personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.

