



*2018-10-15 Dnr Än 2017-292, Dnr On 2017-201, MAR, Rehab och
hjälpmedelsrådet
(utfärdad 2009-09-08)*

Instruktion angående säkerhet och underhåll av tränings hjälpmedel (gr 3)

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

Elektrisk bentränare

Säkerhet vid användning

- TIPPRISK!
 - Om rullstol används se till att tipskydden är nedfällda.
 - Vid behov, förankra rullstol/stol med spännband i bentränaren.
 - Vid behov, placera kilar alt kilbräda bakom rullstolens hjul.
- Se till att brukaren har stadiga skor vid träningen.
- Ändra inte de inställningar fysioterapeuten/sjukgymnasten gjort. Följ de genomgångna individuella instruktionerna.
- Om brukaren upplever obehag avbryt genast och kontakta ansvarig fysioterapeut/sjukgymnast.
- LÄMNA INTE BRUKAREN ENSAM UNDER TRÄNING.
- Tag bort nätsladden ur vägguttaget efter avslutad träning.

Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera regelbundet att muttrarna på pedalernas axlar är hårt åtdragna. Använd den medföljande nyckeln. Se bruksanvisning.
- Rengör med en lätt fuktad trasa.
- Applicera ett par droppar olja på pedalernas axlar ca var 3:e månad.