



*2018-10-15 Dnr Än 2017-261, Dnr On 2017-201, MAR, Rehab och
hjälpmedelsrådet
(utfärdad 2009-09-08)*

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

Ep-larm

Säkerhet vid användning

EP-larm för rörelsereaktion:

Om larmet är felaktigt placerat kan det ge falska larm eller inte larma alls. Se bruksanvisning angående upphängning/placering/ inställning.

EP-larm för fuktreaktion:

Se bruksanvisning för rätt placering i sängen.

Underhåll av hjälpmedel

- Testa larmet minst en gång varje vecka.
- Om larmet ej utlöses kontrollera batterier, inställning och upphängning.
- Batteribyte ska ske vid behov.