



*2018-10-15 Dnr Än 2017-259, Dnr On 2017-201, MAR, Rehab och
hjälpmedelsrådet
(utfärdad 2009-09-08)*

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

Fast toalettförhöjning

Säkerhet/underhåll vid användning

- Kontrollera att plastmuttrar under porslinet är åtdragna och att förhöjningen är väl förankrad på toalettstolen.
- Kontrollera att toaletsits och toalettlock är helt.
- Vid rengöring använd fuktig trasa och mildt rengöringsmedel, se även bruksanvisning.

Se bruksanvisning angående hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrar personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.