



*2018-10-15 Dnr Än 2018-741, Dnr On 2017-201, MAR, Rehab och  
hjälpmedelsrådet  
(utfärdad 2009-09-08)*

## **Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)**

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

### **Förhöjningsklossar**

#### **Säkerhet vid användning**

- Kontrollera alltid att möbeln står stadigt och stabilt innan användning. Det finns risk för att möbeln kan bli instabil eller tippa när man förhöjer med klossar.
- Lägg ev. antihalk under förhöjningskloss för att undvika glidning.
- Möbeln kan behöva extra stöd mot en eller två väggar.

#### **Underhåll av hjälpmedel**

- Kontrollera att möbelben och förhöjningsklossar står stadigt på golvet.
- Kontrollera att förhöjningsklossarna och möbelbenen är hela.