



*2018-10-15 Dnr Än 2017-276, Dnr On 2017-201, MAR, Rehab och
hjälpmedelsrådet
(utfärdad 2009-09-08)*

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

Gåstol

Säkerhet vid användning

- Lämna aldrig någon som går eller står i gåstolen utan uppsikt!
- Gåstolen är ett hjälpmedel och ska användas som en sådan.
- Gåstolens fjädersystem kan medföra en risk att gåstolen kan välta, om den används av en brukare med mycket kraftiga rörelser.
- Gåstolen rullar mycket lätt, man bör därför alltid vara uppmärksam för olika situationer, som brukaren kan komma att hamna i.
- Håll alltid stadigt i hävbygeln när en brukare ska höjas eller sänkas. Detta speciellt viktigt när brukaren ska sänkas ner, då vikten kan få hävarmen till att slå uppåt med stor kraft. Man får aldrig släppa taget om hävbygeln under tiden som någon höjs eller sänks.
- Gåstolen skall endast användas på plant, slätt och hårt underlag.

Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera ofta att alla skruvar, muttrar m.m. sitter fast ordentligt.
- Gåstolen tvättas med varmt vatten och vanliga rengöringsmedel. Undvik skumrören på bålstödsringen, handbygeln och rumpstoppet.

Se bruksanvisning angående hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrad personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.