



*2018-10-15 Dnr Än 2017-279, Dnr On 2017-201, MAR, Rehab och  
hjälpmedelsrådet  
(utfärdad 2009-09-08)*

## **Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)**

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

### **Komfortrollstol**

#### **Säkerhet vid användning**

- Vid överförflyttning i och ur rullstol ska rullstolen alltid vara bromsad om inte annan instruktion har getts.
- Se till att tippskydden är nedfällda.
- Komfortrollstolen ersätter inte brukarens behov av att lägga sig och vila i sängen under dagen. Tiltfunktionen på komfortrollstolen är till för att brukaren ska kunna få en mer varierad sittställning.
- Behöver komfortrollstolen tiltas framåt för att exempelvis underlätta vid matsituationen ska den alltid regleras bakåt efter måltiden, annars finns risk för urglidning.
- Lägg inte en extra dyna på befintlig rullstolsdyna. Det ökar tipprisken.
- Kör brukaren i rullstolen med omdöme. Var observant på att brukaren alltid har fötterna placerade på fotplattorna och armarna på armstöd/bord. Vid trånga passager finns klämrisk.

#### **Underhåll av hjälpmedel**

- Kontrollera att rullstolens däck är välpumpade.  
Kontrollera att bromsarna fungerar och att tippskydden är rätt inställda.
- Kontrollera att tiltningsfunktion samt ryggvinkling fungerar.
- Avlägsna damm och smuts från länkhjulsnaven (de främre hjulen).
- Kontrollera att alla delar på rullstolen är hela och förankrade samt att rullstolen är lätt att manövrera och inget missljud hörs.
- Vid rengöring av rullstolen använd milt rengöringsmedel och fuktig trasa.  
Se även bruksanvisning.

Lagning av punktering och byte av slang och däck får brukaren bekosta själv. Se bruksanvisning angående hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrad personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.