



*2018-10-15 Dnr Än 2017-278, Dnr On 2017-201, MAR, Rehab och  
hjälpmedelsrådet  
(utfärdad 2009-09-08)*

## **Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)**

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

### **Lyftsele/Stålyftsele**

#### **Säkerhet vid användning**

- Personal som hanterar lyftsele/stålyftsele måste ha kunskap om hur dessa ska hanteras, läs bruksanvisning!
- Det finns stor risk för personskada om fel sorts sele används. Kontakta alltid förskrivande arbetsterapeut när behov av lyft och lyftsele uppstår.
- Kontakta arbetsterapeut vid förändrad vikt, allmäntillstånd eller annat som kan påverka säkerheten kring användandet av lyftsele. Selen kan blivit för stor eller för liten.  
Kontrollera att selen som används är förskriven till brukaren.
- Kontrollera alltid att lyftselen är rätt applicerad innan lyftet påbörjas.
- Innan lyftet påbörjas planeras hela förflyttningen t.ex. genom att placera rullstolen bredvid sängen.
- Kontrollera att bandöglorna är rätt påkrokade på lyftbygel och att urkrokningsskydden fungerar. Placera de övre bandöglorna först på lyftbygel. Vid förflyttning med uppsyningslyft ska vadbånd användas, se bruksanvisning.
- När lyftet påbörjas, stanna upp och kontrollera att bandöglorna är påkrokade på lyftbygel (testlyft).
- Lyft aldrig brukaren högre från underlaget än vad som krävs, förflytta brukaren i lyften endast korta sträckor t.ex. aldrig mellan olika rum.
- Avbryt lyftet om brukaren har tendens att glida igenom selen eller om selen är felplacerad på lyften

#### **Underhåll av hjälpmedel**

- Kontrollera att lyftsens tyg och sömmar är hela innan lyftet påbörjas. Obs! Laga eller ändra aldrig en lyftsele
- Följ tvättrådet på selens etikett vid tvätt.
- Kontrollera efter tvätt att etiketten är läsbar samt att tyg och sömmar är hela.