



*2018-10-15 Dnr Än 2017-274, Dnr On 2017-201, MAR, Rehab och  
hjälpmedelsrådet  
(utfärdad 2009-09-08)*

## **Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)**

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

### **Manuell rullstol**

#### **Säkerhet vid användning**

- Vid överförflyttning i och ur rullstol ska rullstolen alltid vara bromsad.
- Vid manuell överförflyttning ska alltid benstöden tas bort eller vinklas åt sidan för att minska risken för fallolyckor.
- Se alltid till att tippskydden är nedfällda.
- Lite luft i däcken ger en nedsatt bromsfunktion.
- Kör brukaren i rullstolen med omdöme.
- Var observant på att brukaren alltid har fötterna placerade på fotplattorna och armarna på armstöd/bord. Vid trånga passager finns klämrisk.
- När rullstolen behöver lyftas ska den alltid lyftas i rullstolens ram.

#### **Underhåll av hjälpmedel**

- Kontrollera att rullstolens däck är välpumpade.
- Kontrollera att bromsarna fungerar och att tippskydden är rätt inställda.
- Avlägsna damm och smuts från länkhjulsnaven (de främre hjulen).
- Kontrollera att alla delar på rullstolen är hela och förankrade samt att rullstolen är lätt att manövrera och inget missljud kan höras.
- Vid rengöring av rullstolen använd milt rengöringsmedel och fuktig trasa. Se även bruksanvisning.

Lagning av punktering och byte av slang och däck får brukaren bekosta själv. Se bruksanvisning angående hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrad personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.