



*2018-10-15 Dnr Än 2017-277, Dnr On 2017-201, MAR, Rehab och  
hjälpmedelsrådet  
(utfärdad 2009-09-08)*

## **Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)**

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

### **Sängdävert, fristående**

#### **Säkerhet vid användning**

- En fristående sängdävert är avsedd för att användas vid lägesändringar i säng och inte vid förflyttning i/ur säng.
- Lyftarmen ska användas över sängen. Se bruksanvisning för placering.

#### **Underhåll av hjälpmedel**

- Vid rengöring används fuktig trasa och mildt rengöringsmedel.
- Kontrollera att den fristående sängdäverten står stadigt samt att skruvar finns och är åtdragna.
- Kontrollera att band som håller triangelgreppet/handtaget är helt och sitter på plats.