



*2018-10-15 Dnr Än 2017-273, Dnr On 2017- 201, MAR, Rehab och
hjälpmedelsrådet
(utfärdad 2009-09-08)*

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

Stöd- och vändhandtag

Säkerhet vid användning

- För att minska risken för personskada måste det säkerhetsavstånd som anges i bruksanvisningen hållas. Se bruksanvisningen för korrekt montering.
- Stöd- och vändhandtag får inte förväxlas med sänggrindar, dvs får inte placeras så att det hindrar brukaren att klara förflyttning i/ur säng.

Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera att stöd- och vändhandtaget är monterat enligt bruksanvisning.
- Kontrollera att stöd- o vändhandtaget är helt och väl förankrat.
- Stöd- och vändhandtaget rengörs vid behov enligt märkning eller anvisning i bruksanvisningen.