



*2018-10-15 Dnr Än 2017-266, Dnr ON 2017-201, MAR, Rehab och
hjälpmedelsrådet
(utfärdad 2009-09-08)*

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

Stödkäpp/kryckkäpp/betastöd/ kvadrant

Säkerhet vid användning

- Hjälpmedlet ska endast användas efter individuell utprovning och inställning. Vid behov av justering kontakta ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.
- Kontrollera regelbundet att hjälpmedlets doppsko sitter ordentligt fast på aluminiumrörets nedre del.
- Kontrollera att skruvarna på gåstativet är väl åtdragna.
- Vid instruktion av hjälpmedlet är det viktigt att tillbehöret isdubb till kryckkäppar vid användning vänds ut från kropp/ben för att undvika skada.

Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera kontinuerligt slitage på doppskor/isdubbar på kryckkäpp/stödkäpp. När behov av byte finns ta kontakt med arbetsterapeut/fysioterapeut.
- Torka av hjälpmedlet vid behov med milt rengöringsmedel.

Se bruksanvisning angående hjälpmedlets maxvikt när det gäller kryckkäpp, betastöd och kvadrant. Vid förändrad personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.