



*2018-10-15 Dnr Än 2017-282, Dnr On 2017-201, MAR, Rehab och  
hjälpmedelsrådet  
(utfärdad 2009-09-08)*

## **Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)**

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

### **Tippbräda el-funktion**

#### **Säkerhet vid användning**

- Vid höj- och sänkning, se till att ingenting kommer i kläm mellan ramdelarna.
- Vid tippning måste bänken först höjas för att undvika att fotplattan tar i golvet och reser bänken i framkant så att framhjulen inte har golvkontakt.
- Hjulen ska alltid vara låsta vid tippning. De främre hjulen ska vara riktade framåt för att undvika att tippbrädan rullar vid tippning av brukaren.
- Brukaren får aldrig lämnas ensam på tippbrädan.
- Kontrollera att alla beslag och tillbehör är fastsatta ordentligt och sitter på rätt plats.
- Förflytta inte brukaren på tippbrädan vid längre distanser, över mattkanter, ojämna underlag eller utomhus.
- Tippbrädan är inte avsedd för våtutrymmen och får inte laddas där.
- Sadeljordar som är slitna ska bytas ut med jämna mellanrum.

#### **Underhåll av hjälpmedel**

- Underhållsladdning av batteriet ska ske kontinuerligt, se bruksanvisning.
- Sadeljordar kan rengöras med mildt rengöringsmedel.
- Kontrollera med jämna mellanrum att kardborrelåsen på sadeljordar är rena och har god vidhäftning.
- Rengöring av underrede med lätt fuktad trasa, får ej högtrycktvättas eller spolas med vatten.
- Dynorna rengörs med mildt rengöringsmedel och fuktad trasa.
- Sprittvätta inte vävplasten, detta ger sprickbildning. Använd andra desinficerande rengöringsprodukter.
- Kolla med jämna mellanrum att alla delar är hela och oskadade.

Se bruksanvisning angående hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrad personvikt ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.