



*2018-10-15 Dnr Än 2017-291, Dnr On 2017-201, MAR, Rehab och
hjälpmedelsrådet
(utfärdad 2009-09-08)*

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

Uppresningslyft

Säkerhet vid användning

- Personal som hanterar uppresningslyft måste ha kunskap om hur den fungerar, förvara alltid bruksanvisning tillsammans med lyften. Personal måste veta hur nödstopp och nödsänkning fungerar, se bruksanvisning.
- OBS! Uppresningslyft får aldrig kombineras med andra selar än företagets egna produkter. Kontrollera alltid att uppresningslyften är hel före användning.
- Vid uppresning måste brukaren kunna stödja på sina ben och medverka, annars finns risk för urglidning och allvarlig personskada. Vid förändrat förflytningsbehov kontakta ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.
- Förflytta brukaren i lyften endast korta sträckor t.ex. aldrig mellan olika rum.

Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera att urkrokningskydden är hela.
- Kontrollera att alla delar på uppresningslyften finns och är förankrade samt att den är lätt att manövrera och att inget missljud hörs.
- Laddning ska ske efter varje användning. Kontrollera att elkontakter och sladdar är hela.
- Uppresningslyften rengörs med fuktig trasa och mildt rengöringsmedel vid behov, se bruksanvisning.

Se bruksanvisning för hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrad personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.