



*2018-10-15 Dnr Än 2017-280, Dnr On 2017-201, MAR, Rehab och
hjälpmedelsrådet
(utfärdad 2009-09-08)*

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

Vårdsäng

Säkerhet vid användning

- Sängen ska alltid vara bromsad vid omvårdnad av brukaren i sängen eller vid överförflyttning i/ur sängen. Minst ett hjul i huvudändan och ett hjul vid fotändan ska vara bromsat (gäller ej vid centralbroms).
- Lämna alltid sängen bromsad och i lägsta läget. Manöverdosan bör hänga på sängsidan eller sänggaveln när den inte används.
- När sängen används eller flyttas, se till att elkablar, vägguttag och manöverdosa inte kommer i kläm eller skadas.
- Risk för personskada finns vid användning av sänggrind. I samband med höjning av ryggstöd bör man observera så att patientens arm/ben ej kommer i kläm i sänggrind.
- Lyftbågen ska användas av brukaren i sängen. Används lyftbågen utåt över sängsidan finns risk att sängen välter.
- Vårdsäng får ej monteras ned och flyttas av privatperson. Hjälpmedelscentrums tekniker ska alltid kontaktas vid nedmontering.

Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera att sänggram och ev. sänggrindar, lyftbåge är hela och förankrade.
- Kontrollera att manöverdosa/elkablar är hela samt att sängens elfunktioner (ryggfällning, sänglyft) fungerar.
- Kontrollera att samtliga bromsar fungerar.
- Vid rengöring av underrede används fuktig trasa och mildt rengöringsmedel. Se även bruksanvisning.
- Kontrollera att sängen är lätt att manövrera och att inget missljud hörs.

Se bruksanvisning angående hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrad personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.