

# Bladder Scan, medicinteknisk produkt

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen  
Dokumenttyp: Direktiv inom Hälso- och sjukvård  
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
Dokumentnamn: Bladder Scan, medicinteknisk produkt  
Utfärdad: 2016-02-02  
Reviderad: 2022-05-02  
Dnr Än: 2016-86  
Dnr SON: 2016-75

## Innehåll

Bladder Scan BVI 9400	3
Bladderscanner finns placerade på	3
Bladderscan ska inte användas på	3
Proben	4
Till varje Bladderscanner medföljer	4
Rengöring	4
Underhåll	4
Leverantör	4

# Bladder Scan BVI 9400

Bladderscan är ett portabelt ultraljudsinstrument för icke-invasiv mätning av urinblåsans volym. Det finns i dagsläget åtta Bladderscanner BVI 9400 som kan användas av alla vårdgivare inom kommunal hälso- och sjukvård i Linköpings kommun.

På angivna enheter finns en ansvarig namngiven person (verksamhetschef eller sjuksköterska) som svarar för att rutin för självtest och kalibrering finns och utförs, att ultraljudsgel finns och att en rutin upprättas hur lån och återlämning sker.

Från och med den 1 maj 2023 ansvarar varje vårdgivare för att tillhandahålla bladderscanner i sin organisation samt service och underhåll. Inför omställningen kommer en fördelning av nuvarande bladderscanner att ske.

Det är varje användares ansvar att vara aktsam om Bladderscan och att meddela ansvarig person om något händer med utrustningen. Skador som uppstår vid handhavandet bekostas av den utförare som åsamkat skadan.

## Bladderscanner finns placerade på

- Ålerydsvägen 5 - 2 st
- Åleryds sjukhem, Ålerydsvägen 7 - 1 st
- Blandarens hemsjukvård, Sveagatan 12 - 1 st
- Aspen servicehus, Barfotegatan 1 - 1 st
- Ryds hemsjukvård, Mårdtorpsgatan 41 - 1 st
- Kärna Vårdby, Kärnavägen 3 - 1 st
- Vretaliden servicehus, Evastigen 19 - 1 st

## Bladderscan ska inte användas på

- Patient med skadad hud eller sår i suprapubisområdet
- Patient med ascites
- Gravid patient

## Proben



Proben är mycket känslig för stötar. Vid transport ska Bladderscanner alltid förvaras i väskan.

## Till varje Bladderscanner medföljer

- Snabbmanual
- Drift- och underhållshandbok
- Två laddningsbara batterier

## Rengöring

Rengör proben efter användning med ytdesinfektion för hälso- och sjukvård.

## Underhåll

Självtest ska utföras var 3:e månad.

Kalibrering utförs en gång per år.

## Leverantör

Allytec AB, Stockholm

kontakt@allytec.se Tel: 08-31 01 46