

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen
Dokumenttyp: Stöd och vägledning
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Dokumentnamn: AD-dyna med gel eller skummaterial
Utfärdad: 2009-09-08
Reviderad: 2018-10-15
Dnr Än: 2017-290
Dnr SON: 2017-201

AD-dyna med gel eller skummaterial

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen. Se bruksanvisning för hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrad personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.

Säkerhet vid användning

- För att få bästa effekt av dynan ska så lite material som möjligt vara placerat mellan brukaren och dynan.
- Undersök brukarens hud dagligen. Om rodnad uppstår eller om huden blir skadad, kontakta arbetsterapeut.

Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera att överdraget är rätt placerat på dynan. Kontrollera också att dynan ligger rätt placerad i rullstolen. Se anvisning på dynan.
- Dynan och överdraget rengörs vid behov enligt märkning eller anvisning i bruksanvisningen.