

# Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen  
Dokumenttyp: Stöd och vägledning  
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering  
Dokumentnamn: AD-dynor luftfyllda  
Utfärdad: 2009-09-08  
Reviderad: 2018-10-15  
Dnr Än: 2017-295  
Dnr SON: 2017-201

# AD-dynor luftfyllda

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen. Se bruksanvisning angående hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrad personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.

## Säkerhet vid användning

- Kontrollera dagligen att dynan är luftfylld och att den är rätt placerad i rullstolen.
- Undersök brukarens hud dagligen. Om rodnad uppstår eller om huden blir skadad, kontakta ansvarig arbetsterapeut.
- För att få bästa effekt av den luftfyllda dynan ska så lite material som möjligt vara placerat mellan brukaren och dynan.

## Underhåll av hjälpmedel

- Luftmängden ska kontrolleras så att brukaren inte sitter igenom underlaget. För korrekt luftmängd, se bruksanvisning och/eller kontakta arbetsterapeut.
- Kontrollera att överdraget är rätt placerat på dynan. Kontrollera också att dynan ligger rätt placerad i rullstolen. Se anvisning på dynan.
- Dynan och överdraget rengörs vid behov enligt märkning eller anvisning i bruksanvisningen.