

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen
Dokumenttyp: Stöd och vägledning
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Dokumentnamn: Bröstsele, höftbälte, vristsele
Utfärdad: 2009-09-08
Reviderad: 2018-10-15
Dnr Än: 2017-246
Dnr SON: 2017-201

Bröstsele, höftbälte, vristsele

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

Säkerhet vid användning

- Kan endast förskrivas till brukare med behov av att förbättra och underlätta positionering och säkerhet i sittande, i förskrivet hjälpmedel. En förskrivning förutsätter att man följer Socialstyrelsens riktlinjer-skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna: Socialstyrelsens meddelandeblad Nr 12/2013. Ovanstående instruktioner på alla selar.
- Bröstsele/vristsele ska alltid användas tillsammans med utprovat höftbälte för att minska risken för skada. Kontrollera dagligen innan användning att selarna är rätt monterade. Kontrollera regelbundet brukarens hud för att upptäcka eventuell rodnad.
- Får endast användas om brukaren samtycker till åtgärden vid varje användningstillfälle.

Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera selarna regelbundet och alltid i samband med tvätt för att upptäcka slitage, brustna sömmar eller skadade spännen.
- Selarna tvättas vid behov enligt märkning eller anvisning i bruksanvisning.
- Efter tvätt kontrollera att bröstsele och höftbälte blir rätt monterat. Vid felaktigt monterade selar finns risk för personskada. För korrekt montering, rådfråga förskrivande arbetsterapeut/fysioterapeut.