

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen
Dokumenttyp: Stöd och vägledning
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Dokumentnamn: Elektrisk bentränare
Utfärdad: 2009-09-08
Reviderad: 2018-10-15
Dnr Än: 2017-292
Dnr SON: 2017-201

Elektrisk bentränare

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

Säkerhet vid användning

- TIPPRISK!
 - Om rullstol används se till att tippskydden är nedfällda.
 - Vid behov, förankra rullstol/stol med spännband i bentränaren.
 - Vid behov, placera kilar alternativt kilbräda bakom rullstolens hjul.
- Se till att brukaren har stadiga skor vid träningen.
- Ändra inte de inställningar fysioterapeuten/sjukgymnasten gjort. Följ de genomgångna individuella instruktionerna.
- Om brukaren upplever obehag avbryt genast och kontakta ansvarig fysioterapeut/sjukgymnast.
- LÄMNA INTE BRUKAREN ENSAM UNDER TRÄNING.
- Tag bort nätsladden ur vägguttaget efter avslutad träning.

Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera regelbundet att muttrarna på pedalerens axlar är hårt åtdragna. Använd den medföljande nyckeln. Se bruksanvisning.
- Rengör med en lätt fuktad trasa.
- Applicera ett par droppar olja på pedalerens axlar cirka var tredje månad.