

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen
Dokumenttyp: Stöd och vägledning
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Dokumentnamn: Gåbord med och utan hydraulik samt el
Utfärdad: 2009-09-08
Reviderad: 2018-10-15
Dnr Än: 2017-262
Dnr SON: 2017-201

Gåbord med och utan hydraulik samt el

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen. Se bruksanvisning angående maxvikt på hjälpmedlet. Vid förändrar personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.

Säkerhet vid användning

- Gåbordet ska alltid kännas stabilt vid belastning.
- Kontrollera alltid innan användning att samtliga låsspakar och vred är ordentligt åtdragna.
- Gåbord ska alltid vara i bromsat läge när den används som uppresning från sittande.

Underhåll av hjälpmedel

- Gåbordet ska kännas stumt/glappfritt. Kontrollera att handtag, armstödsplattor och skruvar är hela och sitter fast samt att höj- och sänkfunktionen fungerar.
- Kontrollera att bromsarna fungerar.
- Gåbordets hjul ska vara lätta att manövrera och inget missljud ska höras.
- Armstödsplattor rengörs med mildt rengöringsmedel och chassiet rengörs enligt bruksanvisning.
- Laddning av batteri ska ske regelbundet, se bruksanvisning samt kontrollera att kablar och sladdar är hela.