

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen
Dokumenttyp: Stöd och vägledning
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Dokumentnamn: Kombinerad arm och bencykel för aktiv träning
Utfärdad: 2009-09-08
Reviderad: 2018-10-15
Dnr Än: 2017-293
Dnr SON: 2017-201

Kombinerad arm och bencykel för aktiv träning

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

Säkerhet vid användning

- TIPPRISK!
 - Om golvplattor finns ska de användas.
 - Om rullstol används se till att tippskydden är nedfällda.
 - Vid behov, förankra rullstol/stol med spännband i arm/bentränaren.
 - Vid behov, placera kilar bakom rullstolens hjul.
- Se till att brukaren har stadiga skor vid träningen.
- Se till att brukaren inte klämmer sig på rörliga delar.
- Placera arm/bentränare så att snubbelrisk inte uppstår.
- Ändra inte de inställningar fysioterapeut/sjukgymnast gjort samt följ de individuella instruktionerna brukaren fått.
- Om brukaren upplever obehag avbryt genast och kontakta ansvarig fysioterapeut/sjukgymnast.
- LÄMNA INTE BRUKAREN ENSAM UNDER TRÄNING.

Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna.
- Kontrollera att handtag/pedaler sitter fast.
- Kontrollera att arm/bentränaren fungerar smidigt och att inga missljud uppstår.
- Rengör med mildt rengöringsmedel.