

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen
Dokumenttyp: Stöd och vägledning
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Dokumentnamn: Stöd- och vändhandtag
Utfärdad: 2009-09-08
Reviderad: 2018-10-15
Dnr Än: 2017-273
Dnr SON: 2017-201

Stöd- och vändhandtag

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

Säkerhet vid användning

- För att minska risken för personskada måste det säkerhetsavstånd som anges i bruksanvisningen hållas. Se bruksanvisningen för korrekt montering.
- Stöd- och vändhandtag får inte förväxlas med sänggrindar, det vill säga får inte placeras så att det hindrar brukaren att klara förflyttning i/ur säng.

Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera att stöd- och vändhandtaget är monterat enligt bruksanvisning.
- Kontrollera att stöd- och vändhandtaget är helt och väl förankrat.
- Stöd- och vändhandtaget rengörs vid behov enligt märkning eller anvisning i bruksanvisningen.