

# Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen  
Dokumenttyp: Stöd och vägledning  
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering  
Dokumentnamn: Stödkäpp/kryckkäpp/betastöd/kvadrant  
Utfärdad: 2009-09-08  
Reviderad: 2018-10-15  
Dnr Än: 2017-266  
Dnr SON: 2017-201

# Stödkäpp/kryckkäpp/betastöd/kvadrant

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen. Se bruksanvisning angående hjälpmedlets maxvikt när det gäller kryckkäpp, betastöd och kvadrant. Vid förändrad personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.

## Säkerhet vid användning

- Hjälpmedlet ska endast användas efter individuell utprovning och inställning. Vid behov av justering kontakta ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.
- Kontrollera regelbundet att hjälpmedlets doppsko sitter ordentligt fast på aluminiumrörets nedre del.
- Kontrollera att skruvarna på gåstativet är väl åtdragna.
- Vid instruktion av hjälpmedlet är det viktigt att tillbehöret isdubb till kryckkäppar vid användning vänds ut från kropp/ben för att undvika skada.

## Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera kontinuerligt slitage på doppskor/isdubbar på kryckkäpp/stödkäpp. När behov av byte finns, ta kontakt med arbetsterapeut/fysioterapeut.
- Torka av hjälpmedlet vid behov med mildt rengöringsmedel.