

# Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen  
Dokumenttyp: Stöd och vägledning  
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering  
Dokumentnamn: Uppresningslyft  
Utfärdad: 2009-09-08  
Reviderad: 2018-10-15  
Dnr Än: 2017-291  
Dnr SON: 2017-201

# Uppresningslyft

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen. Se bruksanvisning för hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrad personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.

## Säkerhet vid användning

- Personal som hanterar uppresningslyft måste ha kunskap om hur den fungerar, förvara alltid bruksanvisning tillsammans med lyften. Personal måste veta hur nödstopp och nödsänkning fungerar, se bruksanvisning.
- OBS! Uppresningslyft får aldrig kombineras med andra selar än företagets egna produkter. Kontrollera alltid att uppresningslyften är hel före användning.
- Vid uppresning måste brukaren kunna stödja på sina ben och medverka, annars finns risk för urglidning och allvarlig personskada. Vid förändrat förflytningsbehov kontakta ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.
- Förflytta brukaren i lyften endast korta sträckor, till exempel aldrig mellan olika rum.

## Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera att urkrokningskydden är hela.
- Kontrollera att alla delar på uppresningslyften finns och är förankrade samt att den är lätt att manövrera och att inget missljud hörs.
- Laddning ska ske efter varje användning. Kontrollera att elkontakter och sladdar är hela.
- Uppresningslyften rengörs med fuktig trasa och mildt rengöringsmedel vid behov, se bruksanvisning.